

自動視野計／コントラスト感度検査機

アイモプラスCS



検査のストレスがない簡単操作

今までのimoの機能はそのままに
新たにコントラスト感度検査がプラスされました。

2重円構造と正弦波の2つのモード

2重円構造と空間周波数特性を用いた正弦波の2つのモードをご用意してありますので、用途に応じて使い分けができます。

暗室不要で省スペース

明るい場所で検査ができるので暗室が不要。専用スタンドはどんな場所でも、検査ができ省スペース化も可能となります。

自動記録出力

検査結果は自動で出力されるので、患者様にとっても直ぐに結果が分かるメリットがあり、余計な手間がかかりません。

検査時間の短縮

測定時間は片眼で約1分と検査時間が短時間でできるため、患者様の負担を軽減することができます。



両眼開放検査

パッチ処理が不要なので、患者様の負担を軽減することができます。

画像データ(測定結果)送信

ネットワーク対応が可能です。

コントラスト感度検査結果例

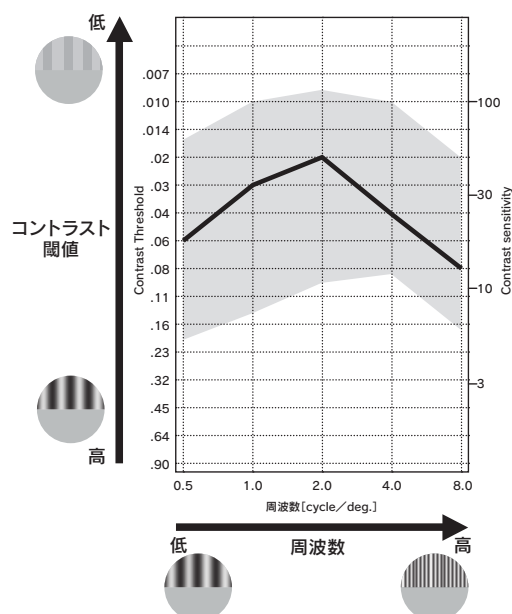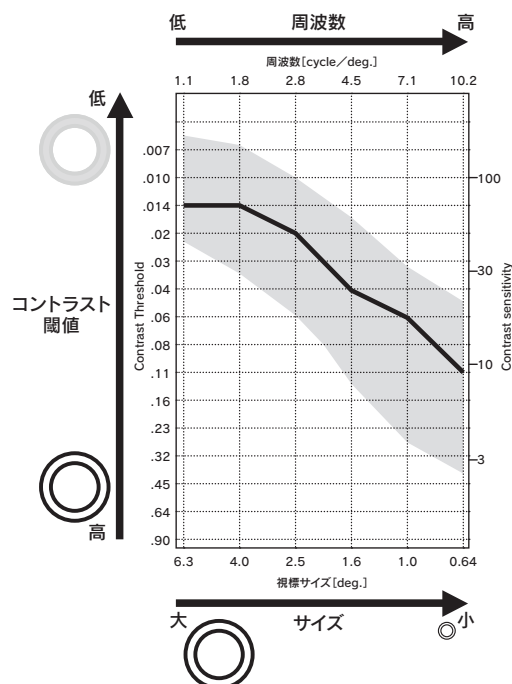

imo+CSの仕様

類別	機械器具22 検眼用器具	
クラス分類	クラスⅠ	
一般的名称	自動視野計 (16918001)、コントラスト感度測定装置 (70092000)	
販売名	アイモプラスCS	
製造販売届出番号	13B3X10168100003	
本体寸法	22cm(W)×38cm(D)×24cm(H)	
本体重量	1.8kg	
視標形状	リング	ストライプ
視標サイズ [deg.]	6.3, 4.0, 2.5, 1.6, 1.0, 0.64	3.0(一定)
空間周波数 [cycle/deg.]	1.1, 1.8, 2.8, 4.5, 7.1, 10.2	0.5, 1, 2, 4, 8
検査距離 [m]	1.0	
検査条件	明所, 薄暮, 暗所	
暗室	不要	

我々、クリュートメディカルシステムズは、以下の企業やそのファンドより出資をうけ、進化した視野検査で Quality of Vision 向上に貢献する日本の医療機器メーカーです。

HOYA株式会社／芙蓉総合リース株式会社／株式会社東京大学エッジキャピタル／大和企業投資株式会社／地域経済活性化支援機構／株式会社フューチャーパートナーズ／SMBCベンチャーキャピタル株式会社／東京大学協創プラットフォーム開発株式会社



株式会社クリュートメディカルシステムズ：製造販売元

〒162-0821 東京都新宿区津久戸町3-11 TH1ビル飯田橋 3F TEL: 03-5579-2998 FAX: 03-5579-2994 URL: <http://www.crewt.co.jp>